


# Kopplingsbyte

För ytterligare information, se sondsystemets bruksanvisningar.


## PEG/Intestinalsond

(15FR = blå, 20FR = lila skruv och lås på yttre fixationsplattan)

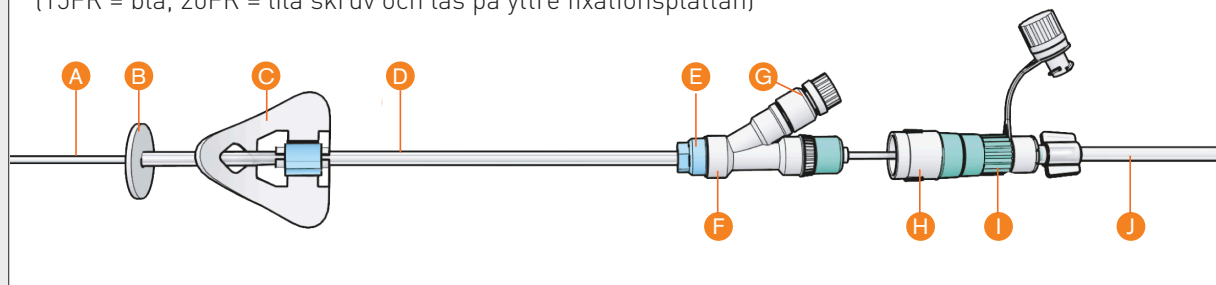


- A** Intestinalsond   **B** Inre fixeringsplatta (PEG)   **C** Yttre fixeringsplatta (PEG)   **D** Magsond (PEG)  
**E** Fixeringsskruv   **F** Y-koppling   **G** Gastroport   **H** Klick-koppling   **I** Intestinalport   **J** Kassettslang


## Avlägsna den gamla kopplingen

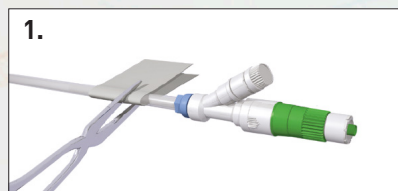

Fixera intestinalsonden med en kompress och peang på PEG:en.

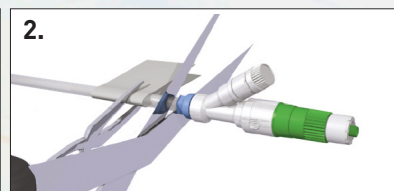


Klipp en rak snittyta genom PEG och intestinalsond intill den gamla Y-kopplingen.

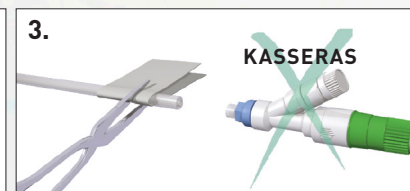


Kassera den gamla kopplingen.


## Förbered intestinalsonden

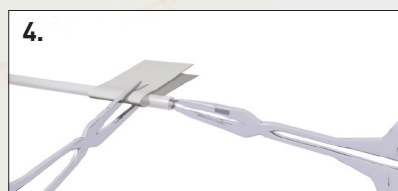

Greppa intestinalsonden med den andra peang och lås den.

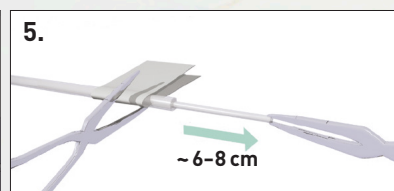

Lossa försiktigt peang på PEG:en. Drag ut intestinalsonden ca 6-8 cm.

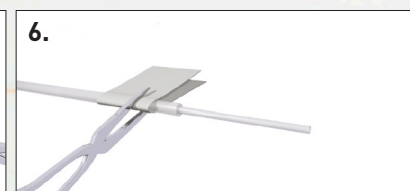


Sätt tillbaka kompress och peang på PEG:en och fixera intestinalsonden.


### Monteraden nya kopplingen




7. Torka PEG:en torr och sätt fixeringsskruven (med förmonterad skruvnyckel) på PEG:en.

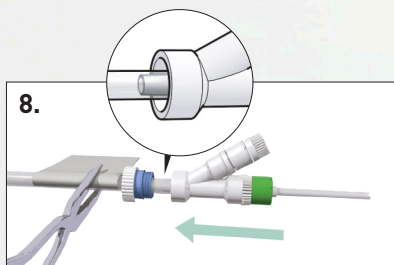


8. För Y-kopplingen så långt in i PEG:en som möjligt.

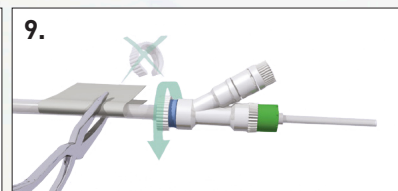


9. Skruva ihop Y-kopplingen med fixeringsskruven. Kontrollera att PEG:en sitter fast i kopplingen. Därefter avlägsnas skruvnyckeln.

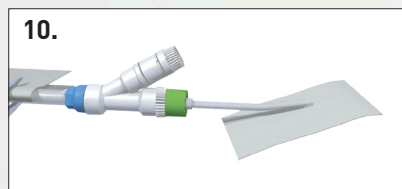


10. Torka intestinalsonden torr.

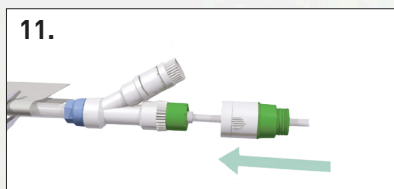


11. Trä klick-kopplingen på intestinalsonden.

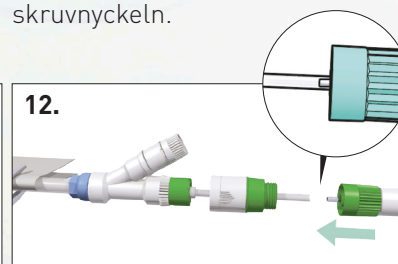


12. Trä intestinalsonden på Luer-Lock-kopplingens metallnippel. Kontrollera att intestinalsonden förts på hela vägen på metallnippeln.

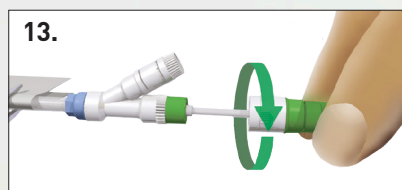

13. Skruva ihop klick- och Luer-Lock-kopplingen genom att skruva på klick-kopplingen till låst läge.

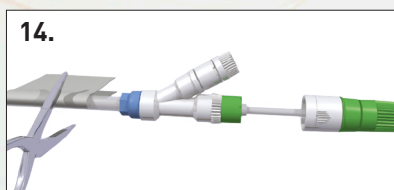

14. Avlägsna peangen.

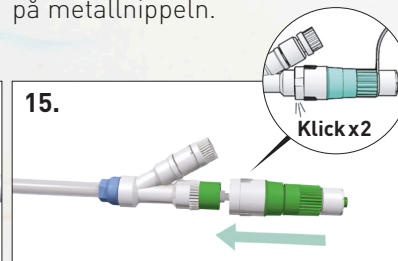

15. Skjut ihop de båda delarna tills det klickar. Se till att de räfflade markeringarna placeras enligt bilden.

### Duodopa Support: 020-50 60 50

**Duodopa**<sup>®</sup> intestinal gel. **Indikation:** Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Medel mot parkinsonism, dopa, inklusive kombinationer med dekarboxylashämmare, Rx, F. Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Varunummer 095314. För fullständig information och prisuppgift, [www.fass.se](http://www.fass.se). Produktresumé uppdaterad 2017-12-01.